

## Dräger DrugTest® 5000 Analyseur pour la détection de stupéfiants

Plus de pipettes, pas de préparation, plus de manipulation, pas d'attente : Avec le Dräger DrugTest® 5000 non seulement le prélèvement est facile et rapide, mais son évaluation se fait de plus en plus automatiquement et immédiatement pour un résultat fiable, sur site.



ST-247-2008

### PRELEVEMENT ET ANALYSE AVEC UN SEUL DISPOSITIF

Le système d'analyse de stupéfiants DrugTest® 5000 est composé d'un kit d'échantillonnage salivaire et d'un analyseur. Vous aurez tout à portée de main, si vous avez besoin d'un premier avis sur le terrain.

### KIT DE TEST DRUGTEST 5000 : PRELEVEMENT DE LA SALIVE FACILE ET RAPIDE

#### Immédiatement opérationnel en cas de besoin

Avec ce kit, vous aurez toujours un dispositif de prélèvement opérationnel à portée de main. Vous voulez contrôler un suspect ou un salarié ? Il suffit de retirer le capuchon et de remettre le collecteur de salive au sujet.

#### Hygiénique et indolore : Prélèvement sans prise de sang

Le sujet met le collecteur en bouche et réalise un prélèvement buccal par frottement à l'intérieur de la joue et la gencive pendant une à quatre minutes. Puis il vous remet l'échantillon – sans que vous n'entriez en contact avec la salive.

#### Virage au bleu signifie : le prélèvement est terminé

L'achèvement du prélèvement est indiqué automatiquement : si le collecteur a récupéré suffisamment de salive, l'indicateur intégré vire au bleu. Glissez alors l'échantillon directement dans l'analyseur DrugTest 5000 pour évaluation.

### AUTRES AVANTAGES DU KIT TEST DRUGTEST 5000 :

- manipulation aisée avec ou sans gants
- convient aux droitiers et aux gauchers
- limite de détection extrêmement basse pour le THC, agent actif principal du Cannabis
- existe en différentes configurations (selon la version, plusieurs substances peuvent être détectées simultanément)
- conservation dans l'emballage d'origine à une température inférieure à 30 °C
- utilisation de 4 à 40 °C
- forte corrélation des résultats en comparaison des analyses sanguines, suivant les limites de détection allemande en vigueur (confirmé par l'Université de Police allemande)
- affichage clair des résultats
- prélèvement et analyse hygiénique
- haut niveau d'acceptation chez les utilisateurs et les personnes testées



D-54724-2012

Dräger DrugTest® 5000 –  
Prélever l'échantillon et l'analyser  
immédiatement



D-31774-2011

Dräger Kit Test pour DrugTest® 5000 :  
simple, rapide, fiable et sûr pour détecter  
des stupéfiants.

## ANALYSEUR DRUGTEST 5000



**Poignée de transport :**

facile à transporter, d'une seule main, même sans sac

Afficheur couleur grande lisibilité

Clavier de commande, facile et rapide

Boîtier robuste

**Grande ouverture :**  
insertion aisée de l'échantillon prélevé

### ANALYSEUR DRÄGER DRUGTEST 5000 : EVALUATION IMMEDIATE DES ECHANTILLONS

#### Introduire le kit de prélèvement, démarrer l'évaluation, et c'est prêt

L'échantillon de salive peut être évalué immédiatement après le prélèvement. Il suffit d'insérer l'échantillon dans l'analyseur, pour que l'analyse commence.

#### Utilisation aisée et sûre, même dans des conditions extrêmes

Même quand le temps est compté : avec seulement trois touches de fonctionnement, vous maîtrisez facilement le système. L'utilisation se fait par menu, il suffit de suivre les indications.

#### Rapide et convivial : les résultats sont connus en quelques minutes

Une fois l'appareil en marche, l'analyse se déroule automatiquement. Vous serez ainsi totalement disponible pour vous consacrer à d'autres tâches comme par exemple vous occuper des personnes soumises à l'examen. Le résultat est affiché au bout de quelques minutes.

#### Afficheur couleur d'une grande lisibilité

L'afficheur couleur est éclairé, assurant une bonne lisibilité même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Le texte affiché reste lisible même à faible distance et désaxé.

#### Des résultats de mesure univoques sans marge d'interprétation

Le résultat mesuré est affiché en toutes lettres. Des erreurs d'interprétation sont de ce fait exclues.



D-2087-2011

Dräger Drugtest® 5000 et ses accessoires dans sa sacoche de transport



ST-8104-2006

Imprimante Dräger Mobile Printer



ST-3451-2003

Clavier compact

### Evaluer les échantillons, là où la situation le demande

L'analyseur est alimenté par une unité d'alimentation intégrée à batteries rechargeables. Affranchi d'une alimentation électrique externe, vous pouvez démarrer une analyse immédiatement, n'importe où.

### Enregistrement et suivi facilité de 500 résultats de mesure

L'analyseur mémorise les 500 derniers résultats mesurés, avec date et heure. Un clavier ou un lecteur de code barre permettent d'y ajouter d'autres informations complémentaires. Les résultats peuvent être imprimés directement sur site avec l'imprimante mobile Dräger. Un transfert de ces données, vers votre PC est possible via la sortie USB de l'appareil.

### Seulement 4,5 kg

En intervention, le poids de l'analyseur passe presque inaperçu. Il est facile à emporter. Pour le transport de l'appareil et de ses accessoires, Dräger propose en option un sac adapté ou un coffret de transport robuste.

### AUTRES AVANTAGES DE L'ANALYSEUR DRUGTEST 5000 :


- diagnostic automatique intégré : pas besoin d'un calibrage semestriel
- nombreux accessoires (par exemple sac, chargeur individuel ou clavier compact)

### LISTE DES STUPEFIANTS ET DES MEDICAMENTS QUE LE DRUGTEST 5000 DETECTE. PAR EXEMPLE :

- Amphétamines
- Benzodiazépine
- Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)
- Cocaïne
- Méthamphétamine
- Opiacés
- Méthadone
- Kétamine


## DRÄGER DRUGTEST 5000

ST-319-2008

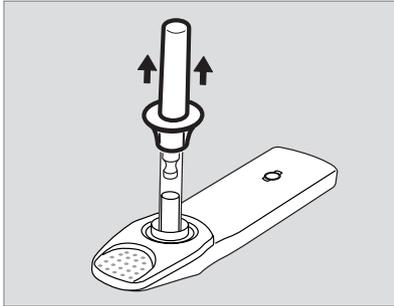


- Retirer le capuchon de protection.
- Remettre le collecteur au sujet.

D-4780-2011

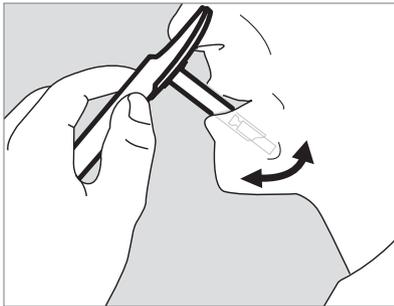

- Le sujet frotte le collecteur dans sa bouche jusqu'à ce que l'afficheur vire au bleu.

D-4779-2011

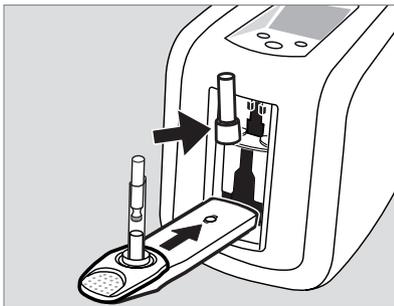

- Glisser le kit dans l'analyseur. L'analyse démarre immédiatement.
- Le résultat est affiché en quelques minutes.

## KIT DE TEST DRÄGER DRUGTEST 5000



**Dräger SSK 5000 :**  
**Détection de drogues sur des surfaces**  
**ou dans des substances**

Vous aimeriez évaluer sur site un échantillon prélevé, par exemple, sur un guidon ou une pièce de monnaie ? Réalisez votre prélèvement avec l'échantillonneur SSK 5000 puis le transférer sur le kit Test. L'analyse de l'échantillon pourra alors être réalisée par l'analyseur DrugTest 5000.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 V CC (via chargeur individuel joint à la livraison)
Courant d'entrée	habituellement 3 A
Dimensions (l × h × p)	200 × 260 × 250 mm
Poids	4,5 kg
Conditions d'utilisation	Température d'utilisation : 4 °C à 40 °C Stockage/Transport: -20 °C à +60 °C Humidité relative 5 à 95 % (non condensante)
Ports	Interface optique pour imprimante, PS/2, USB
Durée d'un mesurage	dépend du kit test utilisé (standard < 9 minutes)
Capacité d'enregistrement	500 données ou mesures

## INFORMATIONS DE COMMANDE

	Unité de conditionnement	Référence
Analyseur DrugTest® 5000	1 analyseur avec chargeur	83 19 900
Kit de test COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP*	20 pièces	83 19 830
Kit de test COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MTD*	20 pièces	83 20 930
Kit de test COC-OPI-THC-AMP-MAMP*	20 pièces	83 21 280
Kit de test COC-OPI*	20 pièces	83 19 990
Kit de test COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD*	20 pièces	83 22 388
Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit COC-OPI-BENZO-THC-AMP-MAMP-MTD-KET*	20 pièces	83 23 646**
Kit d'échantillonnage surface SSK 5000	20 pièces	83 20 490
Clavier compact, format français („AZERTY“)	1	83 15 095
Clavier compact, format anglais („QWERTY“)	1	83 15 497
Clavier compact, format allemand („QWERTZ“)	1	83 15 142
Lecteur de code barre	1	AG 02 491
Imprimante Mobile	1	83 19 310
Sac de transport pour analyseur DrugTest® 5000	1	83 19 960
Sacoche pour analyseur DrugTest® 5000 et accessoires	1	83 22 675
Mallette de transport pour analyseur DrugTest® 5000	1	83 19 925
Câble 12V pour connexion avec prise allume cigare	1	83 12 166

\* COC: Cocaïne – \*OPI: Opiacés – \*BENZO: Benzodiazépine – \*THC: Cannabis – \*AMP: Amphétamine – \*MAMP: Méthamphétamine – \*MTD: Méthadone – \*KET: Kétamine

\*\* Vente uniquement autorisée dans l'Union Européenne

### SIÈGE DU GROUPE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

#### FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67  
safety.france@draeger.com

#### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 38 (30)\*  
CH-3097 Liebefeld  
Tel +41 31 978 74 74  
(Tel +41 58 748 74 74)  
Fax +41 31 978 74 01  
(Fax +41 58 748 74 01)  
info.ch@draeger.com  
\* Valable à partir du 5 septembre 2014

#### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wommel  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60

#### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
contactuae@draeger.com

### Fabricant :

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Allemagne